

楽しい車いすに変身!!  
足を動かす機会の増進に貢献する。

大分県発  
\*施設内専用\*



車いす用着脱式足こぎユニット

COIJAL  
こいじやる!



写真はイメージです。



# 漕ぎたくなる車いす?!

こいじゃる！を車いすにつけて、3輪車のようにペダルを漕ぐことで病院・施設内を“楽しく”移動できます。ペダルは軽いので、足腰が弱った方でも軽く漕ぐことができます。

医療現場の  
声に応じて  
生まれました。

快適  
操作

軽い  
ペダル

簡単  
着脱

## ◎安全・簡単な着脱式

車いす利用者が乗車した状態での着脱が可能なので、乗降時も安全で転倒のリスクが低く、介護者の負担も軽減できます。

※“こいじゃる！”の着脱は第三者によって行っていただきます。

## ◎後付け型なので経済的

現在ご使用の車いすに設置することができて、経済的です。ベルトで固定するので、車いすの種類を選ばずご使用できます。

## ◎快適な乗り心地

わずかな力でペダルが回転するので、利用者に負担をかけることなく乗車していただけます。ペダルとハンドルの操作は独立しており、自在に小回りができます。

ご使用の車いすに“こいじゃる！”を装着すると  
自分の足で漕いで移動ができる車いすに大変身。

車いす着用脱式足こぎユニット  
**COIJAL**  
こいじゃる!

“こいじゃる！”は搬送しやすい自立可能な設計になっています。

前後調節

高さ調節

ハンドルは利用者が操縦しやすい位置に合わせて高さや前後の調節ができます。緊急時には取り外すことも可能です。

利用者の体格に応じて“こいじゃる！”の装着する位置を調節できます。

ペダルはわずかな力でスイスイ回転します。

ペダルの固定はマジックテープなので、着脱も簡単です。



写真はイメージです。

●利用者の声

●“こいじゃる！”はいつも使っている車椅子に座ったまま装着ができるから気軽に運動ができます。●自分の足で漕いで移動ができることがとても嬉しいです。●軽い力でスイスイ漕げて楽しく運動ができるから毎日使いたくなります。

●スタッフの声

●“こいじゃる！”を利用することで患者さんが楽しく運動できることがとても嬉しいです。●取り付け・取り外しも簡単だからスタッフ側の負担もかからない点も嬉しいです。

●着脱方法

注)着脱は車いすの駐車ブレーキをかけて、スタッフ等の第三者に行っていただきます。



1 車いすに乗った状態で、車いすの下に“こいじゃる！”を入れます。

2 車いすと“こいじゃる！”を備え付けのベルトでしっかり固定します。＊ベルトで固定するのは2箇所です。

3 利用者の両足をペダルに乗せてベルトで固定します。

●乗り方

注)“こいじゃる！”は施設内専用設計されています。



ペダルを漕いで前進・後進します。  
＊走行距離計測機能【オプション】

進路方向はハンドルで操作します。  
＊赤い矢印の方向に進みます。

弊社では“こいじゃる！”の安全性・性能にご満足していただけるよう日々、研究・改良を重ねております。実際の商品がパンフレットに記載されている内容と異なる場合がございますので、予めご了承ください。  
2017.9

製品名	こいじゃる!
サイズ	全長980mm×全幅370mm×全高900mm
＊オープン価格	

製造元

株式会社AKシステム  
<http://www.aksys.co.jp/>



車いす用着脱式足こぎユニット

**COIJAL**  
こいじゃる!

株式会社AKシステム

<http://www.aksys.co.jp/>

〒879-5413 大分県由布市庄内町大竜1474番地  
TEL.097-582-3311 FAX.097-582-3633